

Protocolo de uso postoperatorio

G A M E  R E A D Y®



- **Día 1** (Recién operado): Usar el Programa 2 que consiste en 30 minutos de tratamiento y 30 minutos de descanso con presión intermitente de 15mm Hg, suficiente solo para hinchar la banda y tocar la piel. Usar durante todo el día. En la rueda se puede regular la temperatura, pero lo aconsejable para este programa son 10°.
- **Día 2 - 5**: Usar el Programa 3 que consiste en 30 minutos de tratamiento y 30 minutos de descanso con presión intermitente de 50mm de Hg que ayuda con la circulación. Usar durante todo el día. En la rueda se puede regular la temperatura, pero lo aconsejable para este programa son 10°.
NOTA: si el paciente pasa dolor por la noche lo puede usar si quiere durante la misma. Sobre todo los primeros días.
- **Día 5** (del día 5 en adelante): usar Game Ready en modo manual. Tratamientos de 15 minutos con descanso mínimo de 2h y repetidos las veces que se quieran o necesiten. Aquí ya se puede bajar la temperatura a 1° y subir la presión a “Med”.

IMPORTANTE

No es necesario retirar el vendaje para poner la banda de Game Ready, puede aplicarse perfectamente sobre vendas, ropa...



New Materials for a Better Life



Teléfono de contacto:

Jon +34 681 08 95 59

Anabel +34 680 49 12 37